

Se protéger et protéger les autres



Se laver les mains très régulièrement



Tousser ou éternuer dans votre coude ou dans un mouchoir



Utiliser des mouchoirs à usage unique



Saluer sans serrer la main ni embrassade



Garder une distance de 1m avec votre interlocuteur

porcherindustries®

Notice d'utilisation d'un **masque barrière** selon AFNOR SPECS76-001 du 27 Mars 2020

Masques à Usages Non Sanitaires catégorie 1

suivant la note d'information interministérielle du 29 mars 2020

PORCHER INDUSTRIES

75 RD 1085

38300 ECLOSE-BADINIÈRES / FRANCE

TEL- +33 (0)4 74 43 10 10

Domaine d'utilisation :

Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes.

L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières.

Ce masque individuel est destiné à être proposé aux professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leur activités (hôtesses de caisses, agents des forces de l'ordre).

Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.

Performances

Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020

Masque catégorie 1 « UNS 1 » :
masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public.

Efficacité de filtration des particules de 3 µm : > 90%
Respirabilité : essai de perméabilité à l'air > 96 L.m².S-1 pour une dépression de 100 Pa

Utilisation

Le temps de port du masque est limité à 4 heures.
Test au porter pendant 4 heures réalisé par nos soins.

Recommandations de manipulation des masques

- avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique ;
- appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au mieux sur le visage ; vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte ;
- lorsque l'on porte un masque : éviter de le toucher; ne pas déplacer le masque ;
- chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique ;
- si besoin de boire ou de manger, changer de masque ;
- lorsqu'il s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque ;

- pour retirer le masque : l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque) ; le déposer immédiatement dans un sac prévu à cet usage ;

- se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique

Entretien du masque

Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver.

Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensembles et dans ce cas, sortir le masque du sac.

Explication sur la méthode de lavage

Lavage ménager en machine avec un cycle complet à 60°C, d'une durée minimum de 30 minutes avec détergent classique. Séchage en tambour.
Ce masque a été conçu pour être réutilisé et lavé 10 fois.

Composition de la matière principale : Polyester

Stockage

Masques non utilisés à stocker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.

Contexte d'utilisation

Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.

« Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2). »

Pour toute information complémentaire, se référer à la norme AFNOR SPEC S76-001